

ALUSTAT FOAM

CE 1011

Pěna k zastavení krvácení

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SOLOŽENÍ: chlorid hlinitý 20 %, čišťená voda, pomocné látky.

URČENÍ

Výrobek ALUSTAT FOAM je určený k zastavení drobných krvácení během stomatologické léčby. Chlorid hlinitý působí svíravě na drobné cévy, čímž zmenšuje otok a drobná krvácení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přiložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku.

Zastavování krvácení:

Aplikujte ALUSTAT FOAM přímo na krvácející místa. Po 2 minutách opláchněte. V případě potřeby postup opakujte.

Zatažení tkání:

1. Pomocí přiloženého aplikátoru aplikujte ALUSTAT FOAM do otvoru v dásni. Po 2 minutách opláchněte. nebo

2. Umístěte do otvoru v dásni retrakční nit, naneste ALUSTAT FOAM na nit. Po 2 minutách opláchněte.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Může působit dráždivě na sliznice ústní dutiny, kůže a oči. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte jednorázové rukavice a ochranné brýle.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL

Stříkačka s obsahem 0,8 g přípravku, jednorázové aplikátory.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1