

CHLORAXID 5,25%

EXTRA

CE 1011

Přípravek k vyplachování kořenových kanálků

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

**SLOŽENÍ:** chlornan sodný (obsah aktivního chloru 5,25 %), čištěná voda, povrchově aktivní látky.

#### URČENÍ

Během mechanického rozšiřování kanálku odstraňuje zbytky odumřelé dřevě.

Čistí kanálek, včetně odstranění správné vrstvy, aby před vyplněním kořenového kanálku došlo k odhalení vyústění zubovinových kanálků.

Předchází změně barvy zubů, k níž by mohlo dojít po vyplnění nevypláchnutého kanálku.

Adaptér se šroubovacím uzávěrem k odběru přípravku do stříkačky.

1. Odšroubujte šroubovací uzávěr lahvičky.
2. Našroubujte adaptér na lahvičku.
3. Před použitím odstraňte modrý šroubovací uzávěr, našroubujte konec stříkačky na otvor adaptéru, překlopte lahvičku s přípravkem dnem vzhůru a za současného přidržování adaptéru natáhněte tekutinu do stříkačky.
4. Následně postavte lahvičku na desku stolu do svislé polohy a opatrně z adaptéru vyšroubujte stříkačku s tekutinou. Doporučujeme používat stříkačky luer-lock s gumovým pístem.
5. Po každém použití uzavřete adaptér modrým šroubovacím uzávěrem.
6. V případě přepravy odejměte adaptér a našroubujte lahvičku šroubovacím uzávěrem.

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

CHLORAXID 5,25% EXTRA aplikujte do kanálku stříkačkou s jehlou s bočním otvorem. Kanálky vydatně vypláchněte, v množství 10 ml tekutiny na 1 kanálek. Chlornan sodný, který je součástí výrobku, se okamžitě v kontaktu s organickou látkou deaktivuje. Zároveň se snížením koncentrace chlornanu sodného musíte prodloužit dobu vyplachování a zvýšit objem použitého roztoku.

#### KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

**UPOZORNĚNÍ!** Během vyplachování kořenových kanálků, konkrétně mezi vyplachováním chlornanem sodným a chlorhexidinem dihydrochloridem, používejte fyziologický roztok, který zabraňuje srážení hnědé usazeniny. Vydatně proplachujte.

#### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Během proplachování kořenového kanálku nepoužívejte příliš silný proud tekutiny, protože tím může dojít k poškození tkání v okolí hrotu, které se projeví bolestí a otokem měkkých tkání. Dbejte maximální opatrnosti během používání u perforací. Dráždí sliznice ústní dutiny, oči a kůži. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce musíte používat kofferdam. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, ochranná maska, rukavice).

**DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ KE SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!**

#### SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě 2–8 °C (v ledničce). Chraňte proti působení slunečního záření. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

#### PŘEVOZ


Výrobce povoluje přepravu výrobku po dobu delší než 10 dnů při teplotě do 40 °C. Krátkodobý převoz v uvedeném rozpětí teplot nemá vliv na bezpečnost a účinnost působení výrobku po celou dobu jeho použitelnosti.

#### NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

#### OBAL

Láhev s obsahem 200 g nebo 400 g přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.

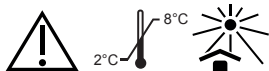

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85