

Tekutina na výplach kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: chlornan sodný (obsah aktivní chloru 5,25%), voda s lékopisnou čistotou.

URČENÍ

Během mechanického rozšíření kanálku odstraňuje odumřelé buničiny. Očišťuje kanály, spolu z odstraněním vrstvy smear layer, na odhalení kanálků před naplněním kanálu. Zabraňuje odbarvení zubů, ke kterému by mohlo dojít po naplnění nevypláchnutého kanálu. Adaptér se šroubovacím uzávěrem na odebrání přípravku na stříkačku

1. Odšroubujte šroubovací uzávěr láhve.
2. Utáhněte adaptér na láhvi.
3. K použití odstraňte modrý šroubovací uzávěr, umístěte koncovku stříkačky v otvoru adaptéru, skloňte láhev s přípravkem dnem vzhůru a odberte tekutinu do stříkačky, současně držte adaptér. Poté nastavte láhev na pultu ve vertikální poloze a jemně vyšroubujte stříkačku s tekutinou z adaptéru. Doporučuje se používání stříkaček luer-lock s gumovou pístí.
4. Po každém použití zabezpečte adaptér modrým šroubovacím uzávěrem.
5. Na přepravu odstraňte adaptér a přišroubujte láhev uzávěrem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

CHLORAXID 5,25% zaveďte do kanálu prostřednictvím stříkačky s jehlou s bočním otvorem. Vypláchněte kanály bohatě, množství cca. 10 ml tekutiny na 1 kanál.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat výrobek CHLORAXID 5,25% u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

POZOR! Při vyplachování kořenových kanálů, mezi vyplachování chlornanem sodným a diglukonátem chlorhexidinu použijte roztok fyziologické sole což zabraňuje srážkám hnědého nánosu. Vypláchněte bohatě.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Během vyplachování kořenového kanálu nepoužívejte příliš silný proud tekutiny, protože toto by mohlo způsobit vniknutí tekutiny k periapikální tkáni a způsobit jejich poškození, které se projevuje bolestí nebo otokem měkkých tkání. Zvláštní opatrnost během používání při perforaci. Dráždivý účinek na sliznice ústní dutiny, očí a kůže. V případě zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poradte se s lékařem. Při požití nenutěte zvracení. Vypít velké množství vody. Poradte se s lékařem. Během provozu, je povinné použít kofferdam. Měli byste také používat osobní ochranné prostředky (brýle, obličejové ochranné masky, rukavice).

DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ PRO SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním balení za teploty 2 - 8 °C (v chladničce). Skladujte v těsně uzavřeném balení. Chraťte proti účinkům slunečního záření. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je na vnitřním obalu. Po otevření balení doba použitelnosti se nemění za podmínky těsného uzavírání po každém použití.

PŘEPRAVA


Výrobce povolí přepravu výrobku po dobu ne delší než 10 dny za teploty nepřesahující 40 °C. Krátkodobá přeprava v daném teplotním rozsahu nebude mít vliv na bezpečnost a účinnost výrobku po celou dobu použitelnosti výrobku.

LIKVIDACE OBALŮ Z VÝROBKU

Opotřebované balení odevzdejte na likvidaci nebo vraťte k výrobci.

BALENÍ

Láhev obsahuje 200 g nebo 400 g přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.

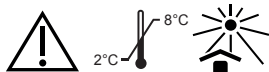

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85