

PAROSIN

ZESTAW DO PŁUKANIA KIESZONEK DZIĄŚŁOWYCH

Preparat w postaci płynu ze strzykawkowym dozownikiem do płukania, przemywania i oczyszczania kieszonki dziąsłowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć zatyczkę i w jej miejsce założyć zagiętą końcówkę. Wprowadzić ostrożnie końcówkę możliwie jak najgłębiej do kieszonki dziąsłowej. Powoli naciskając tłoczek przemyć miejsce zapalne. Płukać aż do momentu, gdy wszystkie stałe zanieczyszczenia wypłyną z kieszonki. Po zakończonym przemywaniu polecić pacjentowi przepłukanie ust wodą.

Dla zmniejszenia dolegliwości bólowych podczas płukania, lekko podgrzać preparat przed użyciem umieszczając go np. w ciepłej wodzie.

ZASTOSOWANIE

- kieszonki dziąsłowe
- okolice wypełnień klasy II
- okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem, zwłaszcza ósemek



ARKONA

- po usuwaniu kamienia nazębnego
- obrzęki dziąseł pod protezami i w okolicy zębów podtrzymujących klamry
- pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony
- przed ekstrakcją, w kieszonkach dziąsłowych sąsiadujących z zębem przeznaczonym do usunięcia
- w okolicy aparatów ortodontycznych

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

INFORMACJE DODATKOWE

Preparat dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych. Preparatu Parosin nie należy stosować do płukania kanałów korzeniowych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepowołanych.

Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej,

cukrzycy oraz u kobiet w ciąży. Nie powoduje uzależnień ani powikłań. Może być stosowany według indywidualnych potrzeb.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu, przepłukać dużą ilością wody i poradzić się specjalisty.

GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają stwierdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

SKŁAD

1. Woda ozonowana
2. Nanokolid srebra
3. Azotan sodu
4. Aromaty
5. Kwas ortofosforowy
6. Kwas mlekowy


1. Zapalenie kieszonek dziąsłowych



2. Okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem (zwłaszcza ósemek)



3. Pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony

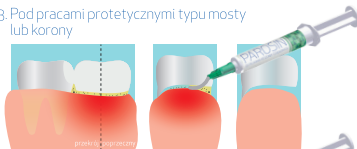

4. Okolice wypełnień klasy II

