

# schülke -†



Na citlivé  
povrchy

Dezinfekční utěrky na bázi kvarterních amoniových sloučenin, určené k rychlé dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné na dezinfekci povrchů a předmětů materiálů citlivých na alkohol.

## mikroqid<sup>®</sup> sensitive wipes

### Naše Plus

- Vhodné na citlivé povrchy
- Okamžitě k použití
- Zaručují rychlý dezinfekční efekt - již od 1 minuty
- Pohodlné a snadné použití

CE 0297

### Oblast použití

**mikroqid<sup>®</sup> sensitive wipes** se doporučují k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště jsou vhodné pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Plastové a akrylátové povrchy
- UZV sondy
- Klávesnice

### Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/ HBV/HCV) / Noro / Rota / Polyoma SV40

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

**mikroqid<sup>®</sup> sensitive wipes** se používají na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. Vyjměte z dózy potřebný počet ubrousků a otírejte jimi povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy uzavřete bezprostředně po vytažení potřebného množství ubrousků. Výrobce garantuje životnost produktu po otevření po dobu 3 měsíců.



# mikrozyd<sup>®</sup> sensitive wipes

## Složení

100 g roztoku mikrozyd<sup>®</sup> sensitive wipes obsahuje následující aktivní látky:

- 0,25 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl chlorid amonný (ADBAC/BKC (C12-C16))
- 0,25 g didecyldimethylamoniumchloridu (DDAC)
- 0,25 g alkyl (C12-C14) ethylbenzylamoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))

## Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	Vodný obsahující roztok na netkaná textilie
Hustota	cca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / aktivního roztoku
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C / aktivního roztoku
Zápalná teplota	Nevztahuje se

## Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Po použití dózu vždy těsně uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem.

Používejte ochranné rukavice.

Doba expirace: 24 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
mikrozyd sensitive wipes prem 100 ST SP	6/Karton	70003108
mikrozyd sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Karton	70003109
mikrozyd sensitive wipes prem 50 ST SP	12/Karton	70003101
mikrozyd sensitive wipes Jumbo 200 ST DS	10/Karton	70003104

## Související přípravky

- mikrozyd<sup>®</sup> AF wipes
- mikrozyd<sup>®</sup> PAA wipes
- mikrozyd<sup>®</sup> sensitive liquid
- mikrozyd<sup>®</sup> universal wipes

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

**Distributor**  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com

**Výrobce**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com